

Using EpiPen® / EpiPen® Jr is as easy as 1-2-3

1. Remove yellow or green cap from carrying case
 - Grasp unit with black tip pointing downward
 - Pull off grey activator cap



2. Jab black tip firmly into outer thigh so it "clicks" AND HOLD on thigh approximately 10 seconds
 - Massage injected area for 10 seconds



3. Seek medical attention



After Using EpiPen® / EpiPen® Jr Follow 3 Easy Safety Steps:

1. Carefully place used auto-injector, needle-end first, into storage tube
2. Screw cap of carrying case on completely.
 - This automatically bends needle back and secures pen so it won't fall out of tube
3. Take unit with you to hospital
Emergency Department



EPIPEN®
EPIPEN® Jr

Distributed in Canada by
ALLEREX® LABORATORY LTD

P.O. Box 13307, Kanata, Ontario K2K 1X5
Tel.: (613) 831-7733, Fax: (613) 831-7738
www.epipen.ca

L'utilisation d'EpiPen® / EpiPen® Jr est aussi simple que 1-2-3

- 1.** Enlever le bouchon jaune ou vert de l'étui
 - Prendre l'unité avec le bout noir pointant vers le bas
 - Enlever le bouchon activateur gris
- 2.** Enfoncer brusquement le bout noir dans la cuisse jusqu'à un « déclic » et tenir pendant environ 10 secondes.
 - Masser la région injectée pendant 10 secondes
- 3.** Obtenir des soins médicaux



Après l'utilisation d'EpiPen® / EpiPen® Jr suivre ces 3 étapes faciles pour votre sécurité

- 1.** Placer soigneusement l'auto-injecteur utilisé, l'aiguille en premier, dans l'étui
- 2.** Bien visser le bouchon de l'étui
 - Ceci repliera automatiquement l'aiguille et retiendra l'unité dans le tube
- 3.** Apportez l'unité à l'urgence de l'hôpital.



EPIPEN®
EPIPEN® Jr

distributé au Canada par
ALLEREX® LABORATORY LTD

P.O. Box 13307, Kanata, Ontario K2K 1X5
Tel.: (613) 831-7733, Fax: (613) 831-7738
www.epipen.ca